

AMS 800™ - De gouden standaard voor SUI bij mannen

"Het is duidelijk dat de AMS 800 de meest effectieve behandeling is voor incontinentie bij de man."

– Dr. Edward McGuire, University of Michigan, Ann Arbor, MI, VS

"Er is geen enkele urologische operatie die ik doe waarover de patiënten zo tevreden zijn en die zo een goede afloop heeft, als het plaatsen van een AMS 800."

– Dr. Timothy Boone, Baylor College of Medicine, Houston, TX, VS

Samenvatting van de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties voor het AMS 800 urinecontrolesysteem

- Het systeem is gecontraïndiceerd bij patiënten met een onomkeerbare obstructie van de lagere urinewegen, onbehandelbare hyperreflexie van de detrusorspier, onbehandelbare blaasinstabiliteit, een actieve infectie of bij patiënten die slechte kandidaten zijn voor een heelkundige ingreep omwille van hun lichamelijke of psychische toestand.
- Patiënten met diabetes, letsel aan de wervelkolom, open zweren in het operatiegebied of patiënten die immuungecompromiteerd zijn of bij wie het immuunsysteem onderdrukt is, kunnen een hoger risico lopen op infecties die voorkomen bij prothese chirurgie.
- Heelkundige, lichamelijke, psychologische of mechanische complicaties kunnen, indien ze optreden, revisie of verwijderen van het systeem noodzakelijk maken.
- Het systeem bevat solide silicone elastomeren. De risico's en voordelen van het implanteren van dit systeem bij een patiënt met een gedocumenteerde overgevoeligheid aan silicone moeten nauwkeurig overwogen worden.

Voor een volledige lijst van de indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen verwijzen we naar de Gebruiksaanwijzing voor de AMS 800 Serie. U kan ook contact opnemen met uw AMS vertegenwoordiger. Dit document is geschreven voor professionelen in de gezondheidszorg. Contacteer uw AMS vertegenwoordiger voor publicaties voor leken. American Medical Systems, Inc. doet een periodieke update van de literatuur over haar producten. Indien u vragen heeft over het up to date zijn van deze informatie, gelieve contact op te nemen met American Medical Systems.

1. Venn SN, Greenwell TJ, Mundy AR. The long-term outcome of artificial urinary sphincters. J Urol Sep 2000 v. 164(3 pt 1) p. 702-706 discussion p. 706-707.
2. Elliott DS, Barrett DM. Mayo Clinic long-term analysis of the functional durability of the AMS 800 artificial urinary sphincter: a review of 323 cases. J Urol Apr 1998 v. 159(4) p. 1206-1208.
3. Haab F, Trackman BA, Zimmern PE, Leach GE. Quality of life and continence assessment of the artificial urinary sphincter in men with minimum of 3.5 years of follow up. J Urol Aug 1997 v. 158(2) p. 435-439.
4. Litweller SE, Kim KB, Fone PD, White RW, Stone AR. Post-prostatectomy incontinence and the artificial urinary sphincter : a long-term study of patient satisfaction and criteria for success. J Urol Dec 1996 v. 156(6) p. 1975-1980.
5. Wilson SK, Delk JR 2nd, Henry GD, Siegel AL. New surgical technique for sphincter urinary control system using upper transverse scrotal incision. J Urol Jan 2003 v. 169(1) p. 261-264.

Solutions for Life™ American Medical Systems is een wereldleider op het gebied van medische instrumenten en ingrepen voor de behandeling van incontinentie, prolaps, menorrhagie, erectiele disfunctie (ED) en benigne prostaathyperplasie (BPH). Elk van deze aandoeningen kan de kwaliteit van leven van de patiënt aanzienlijk verminderen en een belangrijke invloed hebben op dagelijkse activiteiten. Onze producten verhelpen de aandoeningen of verminderen de belemmerende effecten van deze aandoeningen, vaak door middel van minimaal invasieve operaties.

AMS Men's
Health Solutions



SKW Retractor System™



InVance™
Male Sling System



AMS 700 Ultrex®
Penile Prosthesis



AMS Ambicor®
Penile Prosthesis



UroLume®
Endoprosthesis

AMS
Solutions for Life


American Medical Systems, Inc.
World Headquarters
10700 Bren Road West
Minnetonka, Minnesota 55343
United States

Tel: +1 (0) 952 930 6000
Fax: +1 (0) 952 930 6157

www.AmericanMedicalSystems.com
A Publicly Traded Company
(Nasdaq: AMMD)

American Medical Systems
Europe B.V.
Straatweg 66H
3621 BR Breukelen
THE NETHERLANDS

Tel: 0800 0292 012 (NL - gratis)
0800 801 44 (BE - gratis/gratuit)
Fax: +31 (0) 346 258 100
+31 (0) 346 258 130

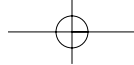


AMS
Solutions for Life



De gouden
standaard
voor matige
tot ernstige
inspannings-
incontinentie
bij mannen

AMS 800TM

Artificiële Urinaire Sfincterprothese

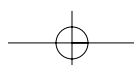


AMS 800™

De gouden standaard voor behandeling van SUI bij mannen

Het AMS 800 urinecontrolesysteem is de enige kunstmatige urinaire sfincter op de markt. Al meer dan 30 jaar implanteren artsen wereldwijd het systeem bij nu meer dan 94.000 mannen. Een efficiënte behandeling voor SUI. Dit systeem is de gouden standaard behandeling voor matige tot ernstige SUI bij mannen, omwille van z'n veiligheid en effectiviteit.


Continentie op lange termijn:

Uit klinische studies blijkt dat de AMS 800 zorgt voor een effectieve controle op lange termijn van matige tot ernstige urine-incontinentie. In een studie bleek dat respectievelijk 92% en 84% van de mannen met een AMS 800 systeem aangebracht in het bulbair deel van de urethra of in de blaashals, na tien jaar nog steeds continent waren.¹

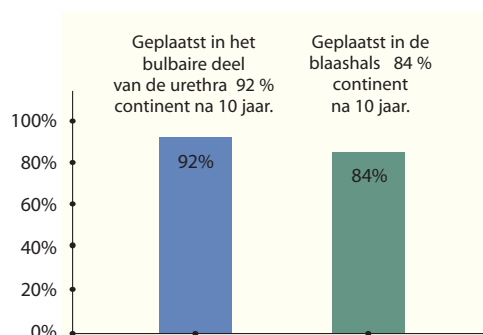


Patiënten zijn zeer tevreden:

Uit een studie bleek dat 90% van de patiënten tevreden is met de AMS 800 en dat 92% het systeem opnieuw zou laten plaatsen. En dat 96% de prothese zou aanbevelen aan een vriend.⁴

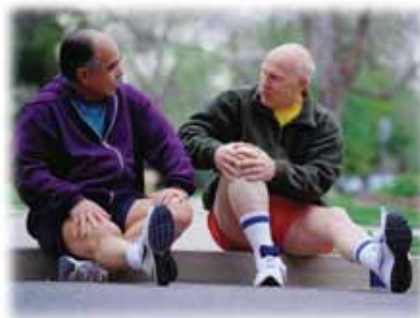

Vernieuwende en betrouwbare technologie:

De AMS 800 prothese bestaat uit een controlepomp, een ballon die de druk regelt en een manchet met een vernauwd achtereinde zodat er minder erosie kan optreden. Het is een zeer betrouwbaar systeem met weinig mechanisch falen.^{2,3}

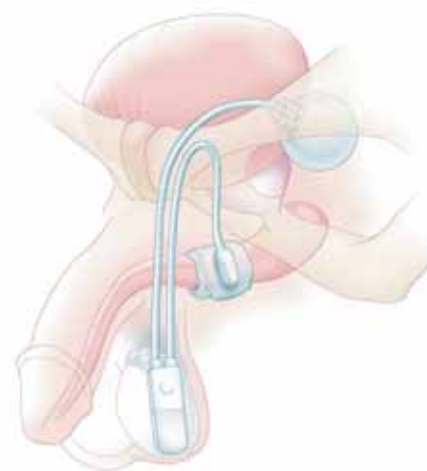

In de tijd bewezen doeltreffend

AMS 800™ biedt:

En dat betekent voor:



Veilige en effectieve procedure

DE PATIËNT:

- Vereist maar één of twee kleine incisies

DE ARTS:

- Eenvoudige chirurgische ingreep.



Aan te passen bestanddelen zoals manchet en ballon

DE PATIËNT:

- Zorgt voor efficiënte, blijvende continëntie ^{1,3} met 90% tevreden patiënten.⁴

DE ARTS:

- Componenten die nauwkeurig aangepast zijn aan de anatomie en de lichamelijke toestand van de patiënt met als doel een optimaal resultaat.



De gouden standaard

DE PATIËNT:

- Het feit dat het systeem al 30 jaar gebruikt wordt, geeft vertrouwen.

DE ARTS:

- Meer geslaagde ingrepen en weinig complicaties.³



Plaatsen van een enkele of dubbele manchet

DE PATIËNT:

- Gebruikersspecifieke behandeling gebaseerd op de mate van de incontinentie.

DE ARTS:

- De mogelijkheid om de patiënt meerdere opties te bieden om terug continent te worden.

Transversale benadering via het scrotum

DE PATIËNT:

- Vereist maar één incisie en minder tijd onder anesthesie dan via de perineale methode.

DE ARTS:

- Gemiddelde operatietijd van 35 minuten (20-52 minuten)⁵ en eenvoudige dissectie.

AMS 800 is een ideale oplossing voor mannen die handvaardig zijn en goede mentale capaciteiten hebben en lijden aan matige tot ernstige post-prostatectomie stress urine-incontinentie.